



# Ideen für die Intensivpflege

## Schritt für Schritt

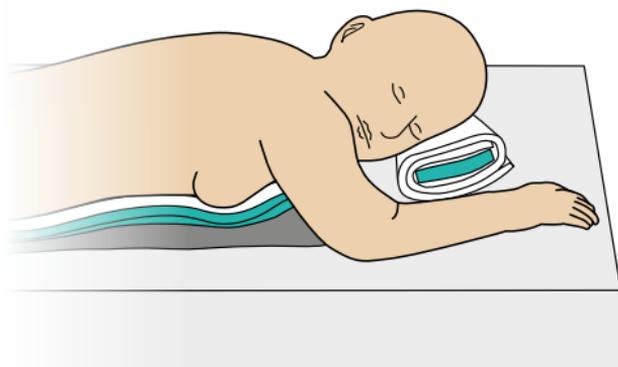

Anleitungen / Schnittmuster

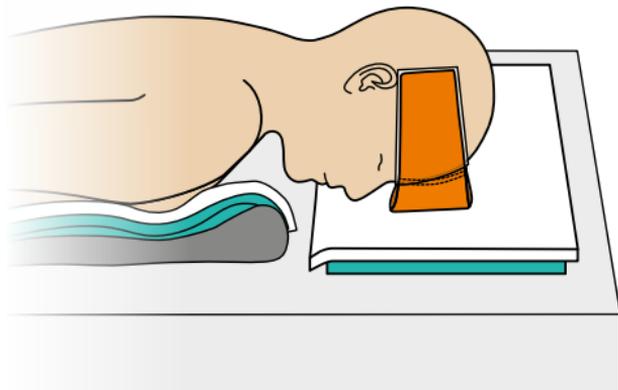

# Bitte beachten:

## Wie und womit schneide ich?

LIGASANO® kann mit einer Schere beliebig zugeschnitten werden.

## Wie lange sind die Produkte verwendbar?

**LIGASANO® weiß** muss nach **spätestens drei Tagen** ausgetauscht werden, da der mechanische Reiz nach ca. dreitägiger Anwendung verloren geht und das Material sich dauerhaft verformt.

**LIGASANO® grün und LIGASANO® orange** sind (zur Druckentlastung) je nach Belastung bis zu mehreren Wochen verwendbar.

**LIGASANO® grün, LIGASANO® orange und LIGASANO® weiß** sind luftdurchlässig und sorgen so für ein optimales Mikroklima.

## Sind die Produkte wiederverwendbar?

**LIGASANO® weiß unsteril ist ein Einmalprodukt** und daher auch nicht wiederverwendbar.

**LIGASANO® grün unsteril und LIGASANO® orange unsteril sind Einmalprodukte**, können bei ausschließlicher Anwendung zur Druckentlastung jedoch oft wochenlang verwendet werden. **LIGASANO® grün unsteril und LIGASANO® orange unsteril** sind bei dieser Anwendungsart waschbar\*.

## Sind die Produkte waschbar?

**LIGASANO® weiß unsteril ist ein Einmalprodukt und daher auch nicht waschbar.** Es verliert nach einer Wäsche den Großteil seiner Eigenschaften.

**LIGASANO® grün unsteril und LIGASANO® orange unsteril sind Einmalprodukte**, können bei ausschließlicher Anwendung zur Druckentlastung jedoch oft wochenlang verwendet und auch bei maximal 95 °C gewaschen werden\*.

\* Die Aufbereitung und Wiederverwendung geschieht auf Verantwortung des Anwenders. Beachten Sie dabei bitte die Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten.


## **Wie muss LIGASANO® aufbewahrt werden?**

LIGASANO® immer in der Originalverpackung und vor Nässe und Licht geschützt aufbewahren.

**Bitte lesen Sie vor der Anwendung sorgfältig die Gebrauchsanleitung, welche jeder Originalpackung beiliegt!**

# Kopfpositionierung

Positionierung des Kopfes **in Rückenlage** mit LIGASANO® weiß und LIGASANO® grün.


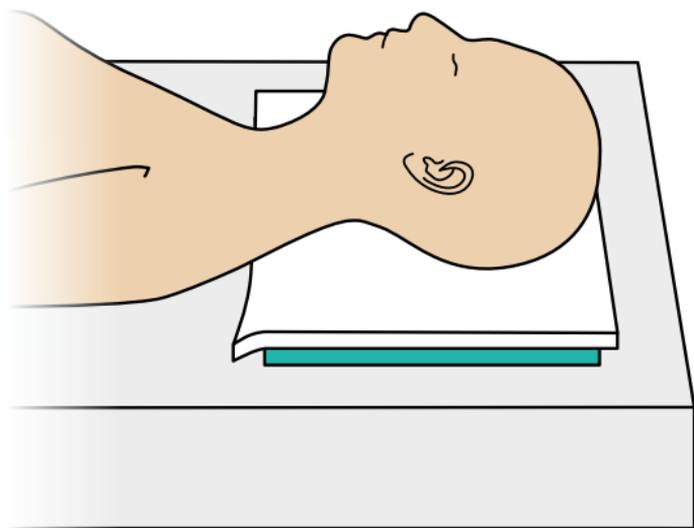


## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	59 x 49 x 2 cm	12001-007 / 12001-028
1 Stück	LIGASANO® grün ●	55 x 45 x 2 cm	16001-007 / 16001-028

# Kopfpositionierung

Positionierung des Kopfes **in Rückenlage** mit LIGASANO® weiß und LIGASANO® orange.

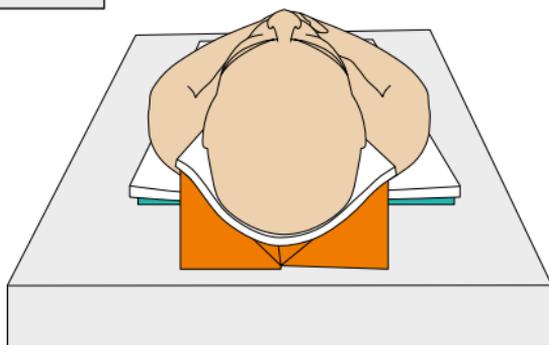
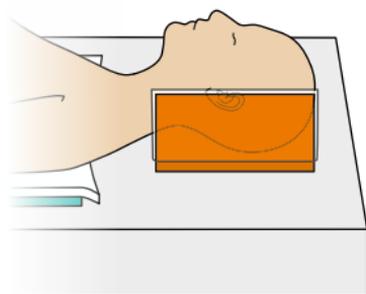


## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	59 x 49 x 1 cm	12002-014 / 12002-056
1 Stück	LIGASANO® orange ●	24 x 12 x 12 cm	36121-002

# Kopfpositionierung

Positionierung des Kopfes **in Seitenlage** mit LIGASANO® weiß und LIGASANO® grün.

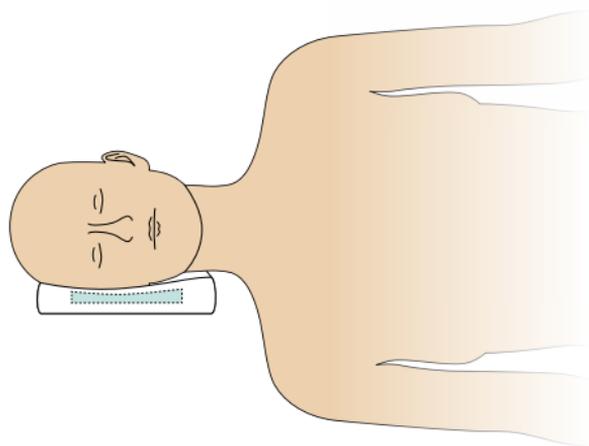
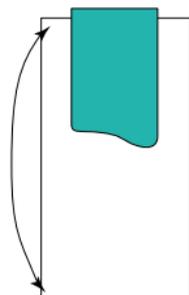


## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß 	59 x 49 x 1 cm	12002-014 / 12002-056
1 Stück	LIGASANO® grün 	55 x 45 x 2 cm	16001-007 / 16001-028

# Kopfpositionierung

**Ohrversorgung** bei Positionierung des Kopfes in Seitenlage oder im Rotorest-Bett mit LIGASANO® weiß in 1cm Dicke: Ausschneiden, 1-2x einklappen, fixieren.

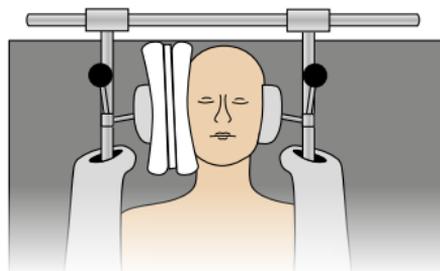
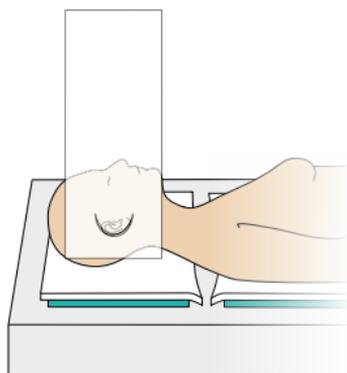


## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß	○ 59 x 49 x 1 cm	12002-014 / 12002-056

# Kopfpositionierung

Positionierung des Kopfes **in Bauchlage** mit LIGASANO® weiß und LIGASANO® grün.

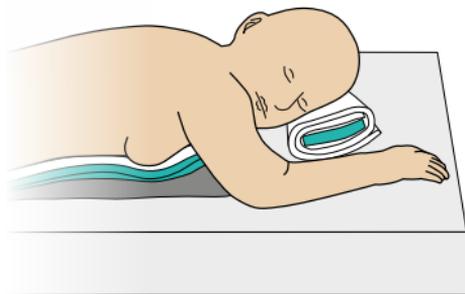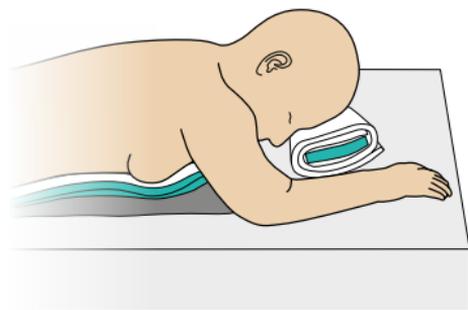



## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß 	59 x 49 x 1 cm	12002-014 / 12002-056
1 Stück	LIGASANO® grün 	55 x 45 x 2 cm	16001-007 / 16001-028

# Kopfpositionierung

Positionierung des Kopfes **in Bauchlage** mit dem Omega-Polsterverband aus LIGASANO® orange und Kontaktpolstern aus LIGASANO® weiß.

Die Höhe des Omega-Polsterverbandes lässt sich in 1cm-Schritten individuell anpassen.

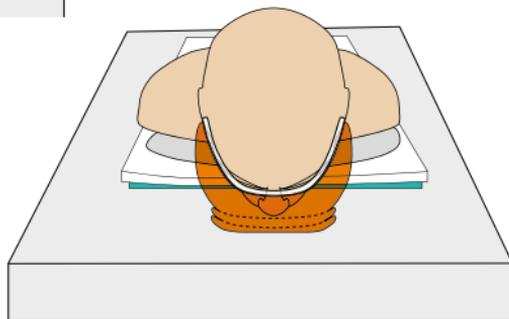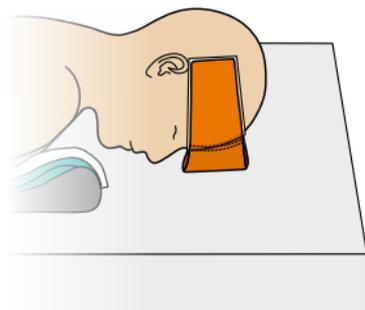



## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	15 x 10 x 1 cm	15159-026
1 Stück	LIGASANO® orange ●	Omega-Polster	36050-006

# Kopfpositionierung

Positionierung des Kopfes **in Bauchlage** mit dem Trapez-Polsterverband aus LIGASANO® orange und Kontaktpolstern aus LIGASANO® weiß.

Die Höhe des Trapez-Polsterverbandes lässt sich in 1cm-Schritten individuell anpassen.

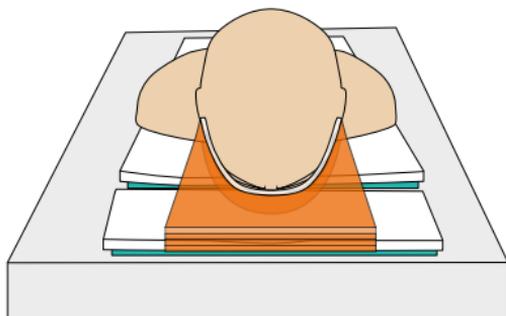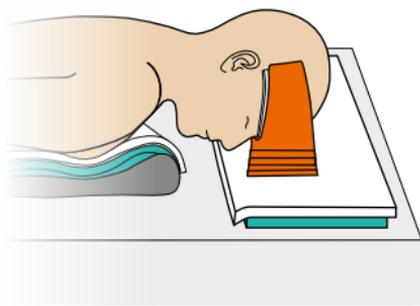


## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	30 x 12 x 1 cm	15159-026
1 Stück	LIGASANO® orange ●	Trapez-Polster	36060-006

# Unterpolsterung


Unterpolsterung von Sauerstoffmasken und CPAP-/BIPAP-Masken mit LIGASANO® weiß.

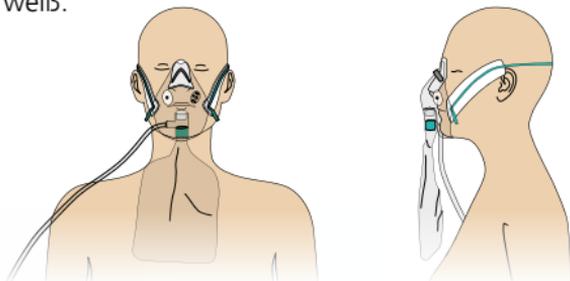

**Materialbedarf:**

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	59 x 49 x 1 cm	12002-014 / 12002-056
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	300 x 5 x 0,3 cm	15571-012
1 Stück	LIGASANO® Roll weiß ○	300 x 5,5 x 0,6cm	15255-001

Schienung und Polsterung von Kathetern (Jugularis-Katheter, Shaldon-Katheter), SPK, DK, Redon, PEG und Sauerstoffschläuchen.

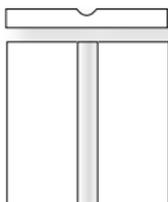

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	59 x 49 x 2 cm	12001-007 / 12001-028

# Unterpolsterung


Kopfpositionierung

Unterpolsterung

Ganzkörperpositionierung


Interrigo

Pädiatrie

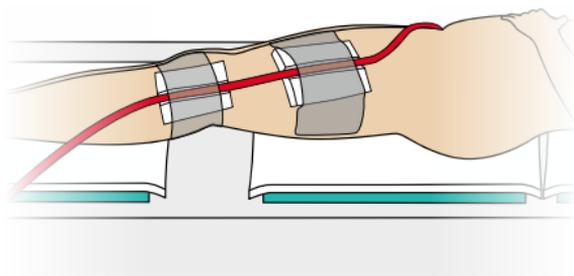

## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
2 Stück	LIGASANO® weiß 	59 x 49 x 2 cm	12001-007 / 12001-028

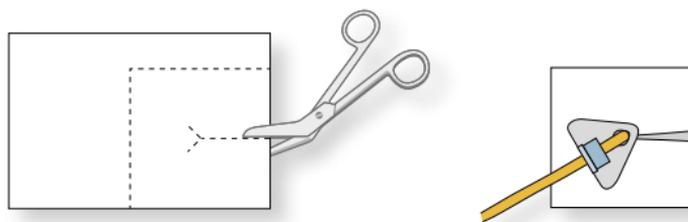

## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß 	5 x 5 x 1 cm Schlitz	15063-020

oder zum selbst zurechtschneiden

1 Stück	LIGASANO® weiß 	15 x 10 x 1 cm	15159-026 / 15009-208
---------	--	----------------	-----------------------

# Unterpolsterung

Unterpolsterung einer Trachealkanüle mit LIGASANO® weiß steril.




## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß sterile Schlitzkomresse 	7,5 x 7,5 x 1 cm	15165-020

# Rückenlage

Positionierung im Liegen in Rückenlage mit LIGASANO® weiß und LIGASANO® grün


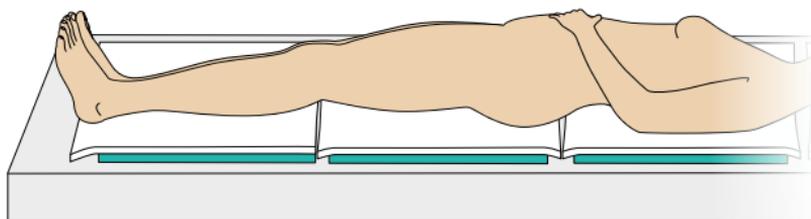


## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
3 Stück	LIGASANO® weiß ○	59 x 49 x 2 cm	12001-007 / 12001-028
3 Stück	LIGASANO® grün ●	55 x 45 x 2 cm	16001-007 / 16001-028

# 135°-Bauchlage

Positionierung in 135°-Bauchlage mit LIGASANO® weiß und LIGASANO® grün.

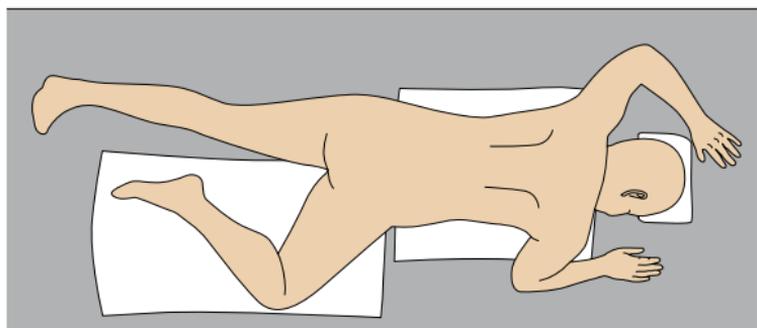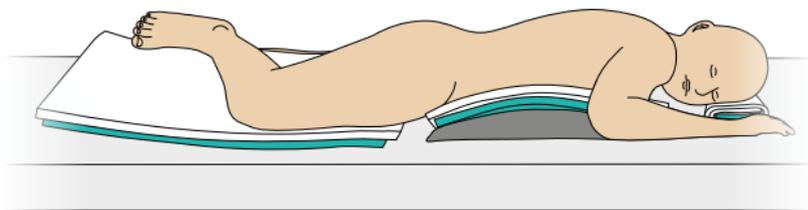


## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
3 Stück	LIGASANO® weiß ○	59 x 49 x 2 cm	12001-007 / 12001-028
	oder LIGASANO® weiß ○	oder 59 x 98 x 2 cm	oder 13004-005 / 13004-020
3 Stück	LIGASANO® grün ●	55 x 45 x 2 cm	16001-007 / 16001-028

# 180°-Bauchlage

Positionierung in 180°-Bauchlage mit LIGASANO® weiß und LIGASANO® grün.

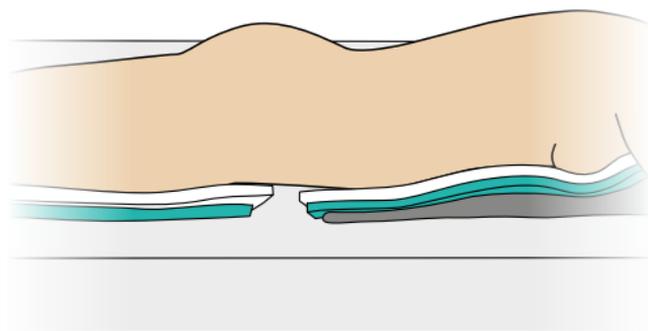


## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
2 Stück	LIGASANO® weiß ○	59 x 49 x 2 cm	12001-007 / 12001-028
2 Stück	LIGASANO® grün ●	55 x 45 x 2 cm	16001-007 / 16001-028



# Intertrigo

LIGASANO® weiß zur Vermeidung von Haut-Haut-Kontakt und als Vorbeugung oder Therapie von Intertrigo. Auch bei Mykosen in Verbindung mit einem Antimykotikum (Spray/Lösung) nach ärztlicher Anordnung.

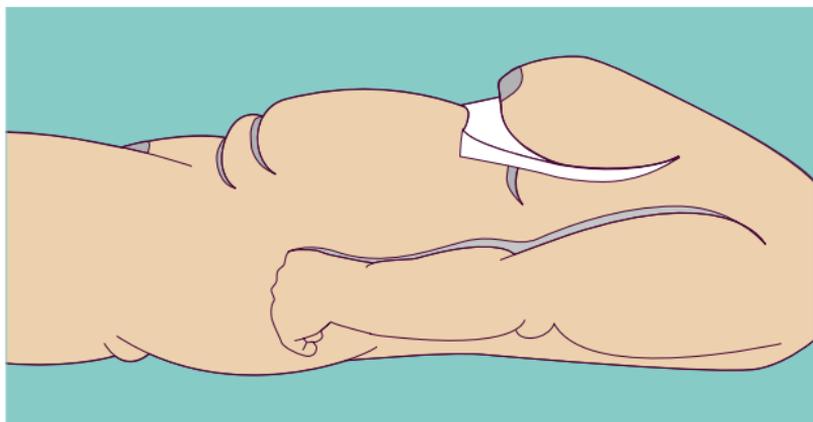

# Intertrigo

Zuschnitte aus LIGASANO® weiß für Bauchfalte, Brust/Busen, Leiste.

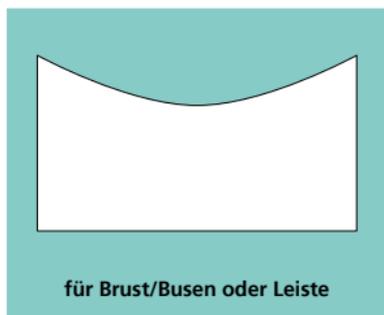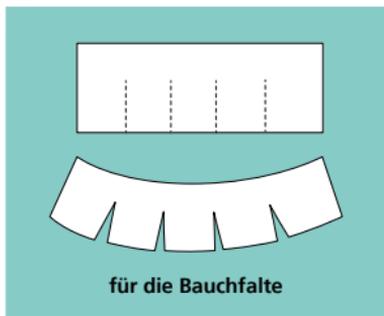

## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	59 x 49 x 2 cm	12001-007 / 12001-028
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	59 x 49 x 1 cm	12002-014 / 12002-056

# Pädiatrie

Druckentlastung mit LIGASANO® weiß unter der Mütze bei binasaler CPAP.



## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	59 x 49 x 0,5 cm	12003-025 / 12003-100

Koppositionierung

Unterpolsterung

Ganzkörperpositionierung

Intertrigo

Pädiatrie

# Pädiatrie

Kopfpositionierung

Unterpolsterung

Ganzkörperpositionierung

Interrigo

Pädiatrie

Druckentlastung der Ferse mit LIGASANO® weiß.




Statt der Rundungen können auch Ecken ausgeschnitten werden.



**Materialbedarf:**

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	59 x 49 x 0,5 cm	12003-025 / 12003-100

Positionierung in Bauchlage mit LIGASANO® weiß.


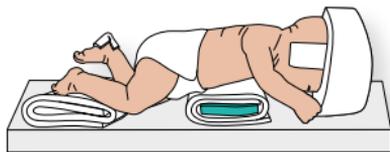


**Materialbedarf:**

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	59 x 49 x 2 cm	12001-007 / 12001-028
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	59 x 49 x 1 cm	12002-014 / 12002-056
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	15 x 8/5 cm Ring	19100-002 / 19100-024
1 Stück	LIGASANO® grün ●	55 x 45 x 2 cm	16001-007 / 16001-028

# Pädiatrie

Positionierung in Rückenlage mit LIGASANO® orange Positionierwürfel und LIGASANO® weiß.

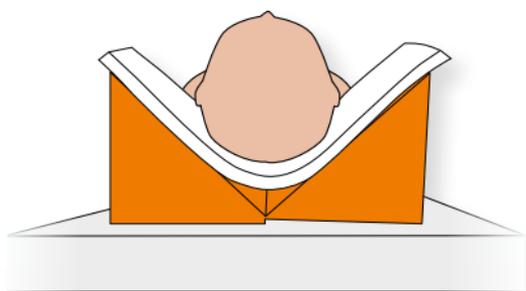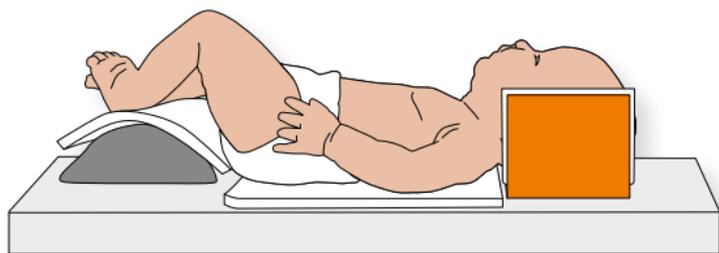

## Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	59 x 49 x 1 cm	12002-014 / 12002-056
1 Stück	LIGASANO® orange ●	12 x 12 x 12 cm	36120-004

Koppositionierung

Unterpolsterung

Ganzkörperpositionierung

Intertrigo

Pädiatrie

# Produkte (Auswahl)

- = LIGASANO® weiß
- = LIGASANO® grün
- = LIGASANO® orange

## LIGASANO® weiß

Anwendung zur

- Durchblutungsförderung der größeren Wundumgebung
- Patientenlagerung, Abpolsterung am Körper
- Intertrigo-Therapie und Prävention
- Prophylaxe und Begleitbehandlung von Pilzinfektionen

**Auch in steriler Ausführung erhältlich!**



Art.-Nr. PZN Versandeinheit

### LIGASANO® weiß

12001-007	17250646	7 Stck.	59 x 49 x 2 cm	unsteril	○
12001-028	17250652	28 Stck.	59 x 49 x 2 cm	unsteril	○
12002-014	17250675	14 Stck.	59 x 49 x 1 cm	unsteril	○
12002-056	17250681	56 Stck.	59 x 49 x 1 cm	unsteril	○
12003-025	17250698	25 Stck.	59 x 49 x 0,5 cm	unsteril	○
15152-010	17251077	10 Stck.	24 x 16 x 1 cm	unsteril	○
15153-005	17251083	5 Stck.	24 x 16 x 2 cm	unsteril	○
15158-013	17251108	13 Stck.	15 x 10 x 2 cm	unsteril	○
15008-104	17250830	104 Stck.	15 x 10 x 2 cm	unsteril	○
15159-026	17251114	26 Stck.	15 x 10 x 1 cm	unsteril	○
15009-208	17250847	208 Stck.	15 x 10 x 1 cm	unsteril	○
15571-012	17251717	12 Stck.	300 x 5 x 0,3 cm	unsteril	○
15573-006	17251746	6 Stck.	300 x 10 x 0,3 cm	unsteril	○
15063-020	17250907	20 Stck.	5 x 5 x 1 cm	unsteril Schlitzkompr.	○
15075-002	17250959	2 Stck.	12x Ø 4,5/4,0 cm	unsteril	○
15075-006	17250965	6 Stck.	12x Ø 4,5/4,0 cm	unsteril	○
15075-024	17250971	24 Stck.	12x Ø 4,5/4,0 cm	unsteril	○
15255-001	17251226	1 Stck.	300 x 5,5 x 0,6 cm	unsteril	○
15164-020	17251120	20 Stck.	5 x 5 x 1 cm	<b>steril</b> Schlitzkompr.	○
15165-020	17251137	20 Stck.	7,5 x 7,5 x 1 cm	<b>steril</b> Schlitzkompr.	○
15166-020	17251166	20 Stck.	10 x 10 x 1 cm	<b>steril</b> Schlitzkompr.	○

# Produkte (Auswahl)

- = LIGASANO® weiß
- = LIGASANO® grün
- = LIGASANO® orange

## LIGASANO® grün + orange

Anwendung zur

- Wundbegleitbehandlung
- Druckentlastung
- Belüftung von Körperpartien
- Vermeidung von Wärmestau

**Auch in steriler Ausführung erhältlich!**



Art.-Nr. PZN Versandeinheit

### LIGASANO® grün

16001-007	17251769	7 Stck.	55 x 45 x 2 cm	unsteril	●
16001-028	17251775	28 Stck.	55 x 45 x 2 cm	unsteril	●
16006-001	17251781	1 Stck.	190 x 90 x 2 cm	unsteril	●

### LIGASANO® orange

36120-004	ohne	4 Stck.	12 x 12 x 12 cm	unsteril	●
36121-002	ohne	2 Stck.	12 x 12 x 12 cm	unsteril	●

### Kombipackungen

12014-010	17250735	6 Stck.	59 x 49 x 1 cm	unsteril	○
		2 Stck.	59 x 46 x 2 cm	unsteril	○
		2 Stck.	55 x 45 x 2 cm	unsteril	●
		1 Stck.	Reißverschluss tasche		

15090-012	17251019	10 Stck.	29 x 12 x 1 cm	unsteril	○
		2 Stck.	Spiralrollen 10 cm breit, ø 8 cm		●

36050-006	17252036	1 Stck.	Omega-Polsterverband, höhenverstellbar		●
		5 Stck.	Hautkontakt-Polster 15 x 10 x 1 cm		○

36060-006	17674949	1 Stck.	Trapez-Polsterverband, höhenverstellbar		●
		5 Stck.	Hautkontakt-Polster 30 x 12 x 1 cm		○

### Fixierhilfe

10305-003	00803561	3 Stck.	LIGAMED® <i>fix</i> Fixierhilfe		
-----------	----------	---------	---------------------------------	--	--

# Bezugsquellen

In Deutschland erhalten Sie unsere Produkte in der Apotheke oder im medizinischen Fachhandel (Sanitätshaus). Wiederverkäufer können LIGASANO® auch direkt über den Großhandel beziehen. Sollte einmal ein Artikel nicht vorrätig sein, können Sie versandkostenfrei auch direkt bei uns bestellen. Das bestellte Produkt ist dann meist am nächsten bzw. spätestens am übernächsten Werktag bei Ihnen.

Sie erreichen uns persönlich Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 16.00 und Freitag von 08.00 bis 13.00. Außerhalb unserer Geschäftszeiten bitten wir Sie, uns Ihre Nachricht auf Band zu sprechen oder eine E-Mail zu senden.

Gerne beliefern wir Sie auch weltweit. Die entstehenden Transportkosten teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Da diese je nach Paketgröße, Paketgewicht und Land variieren, können wir Ihnen die tatsächlichen Kosten erst im Zusammenhang mit einer konkreten Bestellmenge mitteilen.

## **LIGAMED® medical Produkte GmbH**

**Pfannenstielstr. 2 • 90556 Cadolzburg, Deutschland**

**Tel. 09103 / 2046 • Fax 09103 / 2796 • E-Mail: [info@ligamed.de](mailto:info@ligamed.de)**

**Internet: [www.ligasano.com](http://www.ligasano.com)**

Das Copyright für alle Texte, Zeichnungen und Abbildungen in diesem Booklet liegt bei der LIGAMED® medical Produkte GmbH in D-90556 Cadolzburg.

Schulen, Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Praxen dürfen für die eigene Anwendung bzw. für Schulungszwecke Kopien erstellen, ohne vorher die Genehmigung der LIGAMED® einzuholen.

LIGASANO®, LIGAMED®, KLIMAGITTER®, MOLTOSAN®, MOLTOMED®, CAVASAN®, Dr. Guck®, Wundputzer®, A.Pf.E.L.® and  are registered trademarks of LIGAMED® medical Produkte GmbH, Germany