



Wundversorgung mit LIGASANO® weiß bei Dekubitus Grad 2

Patientendaten und Anamnese:

60jährige Patientin, Multiple Sklerose, komplett immobil, Dekubitus Grad II am rechten Trochanter, starke Kontrakturen an Armen und Beinen, schlechter Allgemeinzustand. Die Patientin liegt auf einem Wechsel-drucksystem, ist aufgrund Ihrer körperlichen Einschränkungen äußerst schwer zu lagern und entwickelt immer wieder Dekubitalulzera.



Abb. 1: 04.02.2016



Abb. 2: 04.02.2016



Abb. 3: 26.02.2016

Langfristig bestehender Dekubitus Grad 2 am rechten Trochanter mit mäßiger Exsudation und geröteter Wundumgebung. Versorgung mit LIGASANO® weiß steril 10 x 10 x 1 cm direkt auf die Wundfläche und 24 x 16 x 1 cm unsteril zusätzlich zur Druckentlastung darüber. Fixierung mit Klebevlies im Randbereich. Verbandswechsel 2-tägig. Lagerung der Patientin auf LIGASANO® Platten grün und weiß zur Therapieunterstützung und Druckentlastung. Vollständige Abheilung der Wunde am 26.02.2016.

Autorin: Daniela Laskowski, Krankenschwester, Wundexpertin aus Fulda
Korrespondenz über LIGAMED® medical Produkte GmbH