



# 47 Wundbehandlung bei Ulcus cruris mit LIGASANO® weiß

Antje Heidenreich, Radebeul

## Patientendaten und Anamnese:

54-jähriger Patient, Diabetiker, mit bereits länger bestehenden Wunden an beiden Unterschenkeln (links zirkulär). Wundbehandlung seit Februar 2017 mit verschiedenen Produkten der modernen Wundversorgung, allerdings mit eher mäßigem Erfolg aufgrund Wundbelag und unzureichendem Exsudatmanagement. Im Juli 2017 wurde ein chirurgisches Débridement im Krankenhaus durchgeführt. Das zirkuläre Ulcus cruris des linken Unterschenkels ist auf den Bildern nicht vollständig zu sehen.

Verbandwechsel und Kompressionsbehandlung wurden von der Ehefrau, einer Altenpflegerin, durchgeführt.

## Start der Wundbehandlung mit LIGASANO® weiß am 30.08.2017.

Die Wundreinigung erfolgte mit Prontosan, der Primärverband bestand aus sterilem LIGASANO® weiß (zu Beginn in der Größe 29,5 x 24,5 x 1 cm, später 24 x 16 x 1 cm), als Sekundärverband fungierte eine Saugkomresse. Der Verbandwechsel wurde täglich durchgeführt.

Therapiebegleitung: Kompression des rechten Unterschenkels mittels Kompressionsstrumpf, des linken Unterschenkels mit Kompressionsbinden. Die Schmerztherapie ( 2 x täglich Pregabalin 150 mg) konnte im Verlauf der Wundbehandlung mit LIGASANO® reduziert werden.



**Abb. 1:** Beginn der Wundbehandlung mit LIGASANO® weiß am 30.08.2017



**Abb. 2:** Wundzustand des linken Unterschenkels am 13.09.2017



**Abb. 3:** Wundzustand des rechten Unterschenkels am 13.09.2017



**Abb. 4:** LIGASANO® weiß nach Abnahme des Verbandes



**Abb. 5:** Wundzustand des linken dorsalen Unterschenkels am 27.09.2017



**Abb. 6:** Wundzustand des linken lateralen Unterschenkels am 27.09.2017



# 47 Wundbehandlung bei Ulcus cruris mit LIGASANO® weiß

Antje Heidenreich, Radebeul



**Abb. 7:** Wundzustand des linken Unterschenkels am 25.10.2017



**Abb. 8:** Wundzustand des rechten Unterschenkels am 25.10.2017



**Abb. 9:** Wundzustand des linken Unterschenkels am 25.11.2017



**Abb. 10:** Wundzustand des rechten Unterschenkels am 25.11.2017



**Abb. 11:** Fast abgeheilte Wunde des linken Unterschenkels am 03.01.2018. Versorgung aktuell mit hydroaktivem Schaumverband und konsequenter Kompression.

## Autoren:

Antje Heidenreich, Examinierte Krankenschwester, Wundexpertin ICW, PraxiMed Vertriebs GmbH  
Petra Hofmann, Examinierte Krankenschwester, AZWM®-Wundmanagerin, Rechenberg-Biebramühle