



La aplicación de LIGASANO® blanco y LIGASANO® verde en la podología

Datos de paciente:

Paciente masculino, 50 años, móvil en partes, estado después de un accidente de tráfico en septiembre 2007. Desciación del metatarso de ambos lados, a lateral derecho < izquierda después fracturas de huesos metatarsianos 2 y 4 a ambos lados, que se tratan conservadoramente, así como una fractura de hueso cuneiforme intermedia de ambos lados y voladura de calcáneo lateral del lado derecho. Distorsión de la muñeca derecha, estado después de una fractura de manubrium del esternón, síndrome de columna vertebral lumbar.

Diagnóstico después de la primera visita en mi consultorio, abril 2008:

Por el accidente, ambos pies son anormal y a partidas prominentes son expuestos de presión exterior (a través del calzado). Enrojecimiento de la piel y en partes heridas pequeñas indican a esos lugares. Sobre todo, en el espacio entre los dedos hay una infección por hongos con lesiones de la piel acompañadas. Porque los pies del paciente no pueden rodar, ello recibió zapatos de gimnasia habituales con planchas de acero adentro.



Imagen 1:
Diagnóstico del 15-04-2008: primer consulta en el consultorio de podología



Imagen 2:
Tratamiento para descompresión del pie izquierdo porque el hueso metatarsianos elevado causa problemas de caminar



Imagen 3:
Vista de la izquierda. Materiales usados: 1 pieza de LIGASANO® blanco, 24x16x2cm, 1 venda de LIGASANO® blanco, ancho 10 cm, fijación con LIGAMED® Fix



Imagen 4:
Tratamiento de las heridas pequeñas en el espacio entre los dedos con cortes de una compresa de LIGASANO® blanco, grosor 1 cm



Imagen 5:
Adicional uso vendas de LIGASANO® blanco por el fomento de la circulación sanguínea local



Imagen 6:
Generalmente uso la venda de 10 cm anchura

Las heridas pequeñas en el área interdigital están cuidados con cortes de LIGASANO® blanco. Para esto, yo corto trocitos de una compresa de LIGASANO® blanco, 1 cm de anchura. En principio, yo curo infecciones por hongos que están entre los dedos, con antimicóticos líquidos, porque pomadas y cremas de antimicótico ocluyen la vendaje de LIGASANO® y los poros de la piel.



Imágenes 7 - 9:

La venda de LIGASANO® está atado al pie, ½ solapado. Fijación con LIGAMED® Fix como en imagen 2 y 3.

Siguiente lo muestro una alternativa al tratamiento superior. Un tratamiento con mangueras por dedos de LIGASANO® blanco y una compresa de LIGASANO® verde:



Imágenes 10 - 12:

Con cuidado, los mangueras están poniendo y adaptado sobre los dedos. Después la venda de LIGASANO® está atado al pie, ½ solapado. Seguidamente, la compresa de LIGASANO® verde está poniendo sobre el pie. Fijación adicional con LIGAMED® Fix como en imagen 2-3.



Imagen 13:

Tamponear de la ranura ungular con trocitos de LIGASANO® blanco por la prevención. Antes, el paciente tuvo una uña encarnada en el pie.

Resumen

Con ambos productos, LIGASANO® blanco y LIGASANO® verde, puedo curar muchos problemas y enfermedades en mi consultorio de podología. Los productos son fáciles en el uso y sobre todo, el efecto de descompresión y el soporte de circulación sanguínea, son muy útiles. Por la descompresión rápida, LIGASANO® blanco adecua a las conturas sin presión. Normalmente, los pacientes enseguida sienten un mejoramiento de su situación. La capacidad de absorción de LIGASANO® blanco se afecta positivo a los espacios de los dedos. Por acolchados anchos, con gusto uso LIGASANO® verde, porque LIGASANO® verde es absolutamente aerífero y evita una acumulación del calor.

Nota

En las imágenes usted puede ver, acolchados anchos de LIGASANO®. Parece que los pacientes no pueden llevar zapatos. Yo estaba sorprendida que los pacientes con acolchados (imagen 2-3) pudieran llevar sus zapatos sin problemas. Me reportaron que tenían sentimientos agradables, que continuaron.

Abril 2008

Autora: Monika Westermaier-Pickl, consultorio de podología, Großhabersdorf / Alemania
Correspondencia sobre LIGAMED® medical Produkte GmbH