

Newsletter Dezember 2018

Dies und das

Liebe Newsletter-Abonnenten,

wir bedanken uns für die rege Teilnahme an unserem November-Silbenrätsel, dessen Lösungswort "**Nikolaus**" lautete. Die Gewinner sind bereits ermittelt und erhalten in den nächsten Tagen per Post ihr Jahreslos der Aktion Mensch.

Am 15. November fand der alljährliche nationale Anti-Dekubitus-Tag statt. An vielen Orten fanden an diesem oder dem folgenden Tag Veranstaltungen zum Thema Dekubitusprävention statt.

Auch wir waren nicht untätig und nahmen als Aussteller an zwei Veranstaltungen teil.

Passend zum Thema haben wir für Sie in diesem Newsletter als interessanten Fall einen Dekubitus ausgewählt, bei dem sowohl die Wundreinigung als auch das komplette Verbandsregime auf LIGASANO® aufgebaut ist.



Kennen Sie eigentlich schon unser Schnittmusterheftchen für Prävention und Druckentlastung? Darin finden Sie zahlreiche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Herstellen verschiedener Polster für alle Körperpartien.

Auch für die Intensivpflege und für die Podologie haben wir inzwischen zwei Heftchen mit Schnittanleitungen.

Gerne schicken wir Ihnen die Hefte kostenfrei zu, Sie müssen nur auf diesen Newsletter mit dem Stichwort "Booklet Schnittmuster" antworten. Und bitte vergessen Sie nicht, uns Ihre Postanschrift für den Versand mitzuteilen.

Herzliche Grüße und eine ruhige Vorweihnachtszeit wünscht Ihnen

Ihr LIGAMED-Team

Der interessante Fall

Patientendaten und Anamnese:

53-jähriger dunkelhäutiger Mann mit kompletter Paraplegie sub Th8 nach Arbeitsunfall 1996, Z.n. rezidivierenden Dekubitalulzerationen in den vergangenen Jahren, Colostoma Anlage Dezember 2015, VY Plastik gluteal 2017; Z.n. Anasarka, Kardiomyopathie, Diabetes mellitus Typ II

Aktuell großflächiges, superinfiziertes Dekubitalulcus Stadium 4 sakral

- Länge 13 cm, Breite 7 cm, Tiefe ca. 1 cm, Wundrand 0,2 cm unterminiert
- Wundrand sehr stark mazeriert
- keine Entzündungszeichen
- Exsudat mittelmäßig, Geruch unauffällig, Beläge (Biofilm) sichtbar
- Blutungsneigung nach mechanischem Débridement

Wundbehandlung:

Mit steriler Wundspüllösung getränkte Kompressen wurden für 15-20 Minuten auf die Wunde aufgelegt, danach wurde der Biofilm mit LIGASANO® Wundputzer® intensiv entfernt. Anschließend Einlage von LIGASANO® weiß steril Wundband mini in die Wunde, Abdeckung mit LIGASANO® weiß steril 10x10x1cm, Sekundärabdeckung mit unsterilem LIGASANO® weiß. Die Fixierung erfolgte mit Fixomull stretch und Softthose.



Abb. 1: 12.04.2017 Wundzustand vor Beginn der Behandlung mit LIGASANO® PUR-Schaumverband



Abb. 2: 12.04.2017 Mechanisches Débridement mit LIGASANO® Wundputzer® intensiv



Abb. 3: 18.04.2017 Wunde mit LIGASANO® weiß unsteril zur Druckentlastung gepolstert, mit Klebefolie fixiert.



Abb. 4: 21.04.2017 Minimale Unterminierungen mit LIGASANO® Wundband mini ausgelegt, deutliches Exsudat im Sekundärverband erkennbar, täglicher Verbandswechsel erforderlich.



Abb. 5: 27.04.2017 Verschmelzung vom Wundgrund mit dem Wundrand hat deutlich zugenommen, die Wundtiefe hat abgenommen.



Abb. 6: 05.05.2017 Wunde vollständig mit LIGASANO® weiß Wundband mini bis zum Wundrand austamponiert

Der interessante Fall



Abb. 7: 15.05.2017 Rosiger, gut ernährter Wundgrund, beginnende Epithelisierungsphase erkennbar



Abb. 8: 22.05.2017 Wunde streifenförmig mit LIGASANO® Wundband mini ausgelegt, weiterhin täglicher Verbandswechsel



Abb. 9: 30.05.2017 Wundgrund reagiert mäßig, pigmentloser Wundrand hart und gut ernährt

Zwischenbilanz nach zweimonatiger Behandlung mit LIGASANO®: Die Wunde entwickelt sich im Verlauf relativ langsam in Richtung Heilung. Nur kleine Schritte in die richtige Richtung sind erkennbar. Begleiterkrankungen am Patienten erschweren den Prozess. Intensive Kontrollen und Durchhaltevermögen waren hier besonders gefragt. Intensive Zusammenarbeit mit dem Team war erforderlich. Gute Absprachen mit dem Hausarzt unerlässlich.



Abb. 10: 13.06.2017 Wundrand wirkt verhornt und avital, zeigt jedoch steigende Aktivität in Richtung Verbindung zum Wundgrund, Wunde ist nun deutlich kleiner; sauberes Wundbett.



Abb. 11: 20.07.2017 Wunde zeigt weiterhin kleine Entwicklungsschritte, ein entgleister Diabetes und weitere Wunde am Trochanter bremsen den Heilungsprozess aus.



Abb. 12: 25.07.2017 Chirurgisches Débridement in der BG Klinik Murnau

Der interessante Fall



Abb. 13: 12.09.2017 Trotz reichlich Exsudat und massivem Biofilm hat sich ein nahtloser Übergang vom Wundgrund zum Wundrand entwickelt.



Abb. 14: 07.11.2017 Nach Trochanter OP und stabilen BZ-Werten nun rasanter Fortschritt; Wunde um die Hälfte verkleinert; Wundrand weich, pigmentlos geblieben, gut ernährt.



Abb. 15: 14.12.2017 Wunde geschlossen, weiche, rosige Hautbildung am Wundgrund, Wundrand geebnet.



Abb. 16: 28.05.2018 Der Patient benutzt seit kurzem präventiv die LIGAMED® Fersenschuhe zusammen mit einer Einlage aus unsterilem LIGASANO® weiß

Fazit:

Auf Rücksicht der Freiheitswünsche des Patienten (tägl. mehr als 6-stündige Ausflüge mit dem Rollstuhl, bzw. tägliches Duschen), dem generell desolaten Allgemeinzustand (Nieren-, Schilddrüsen- und BZ-Werten) und einer stark infizierten Fistelgangwunde am Trochanter, ist die Wunde unter Beachtung steriler Wundversorgung abgeheilt. Die Grundbedingungen bei einem Patienten mit Querschnitt sind aufgrund der schwer einschätzbaren Hauttemperaturschwankungen (Schweißbildung, Auskühlung oder Überwärmung) eine große Herausforderung in der Wundbehandlung. Ein guter Erfolg in nur 8 Monaten.

Autoren:

**Advivo ambulante Beatmung GmbH, München, unter der Leitung von Carola Boser, PDL
Dr. med. Luis Antonio da Silva Jäger, München**

Newsletter Dezember 2018

Messen & Kongresse

Im Dezember finden Sie uns in der Industrieausstellung der folgenden Veranstaltungen.

Vielleicht sehen wir uns dort? Wir freuen uns auf Sie.



01.12.2018

Wintercollege Wundmanagement

Bayerische Pflegeakademie, Edelsbergstr. 6, 80686 München

06.12.2018

Wundforum Marien Hospital Dortmund-Hombruch

Marien Hospital, Gablonzstr. 9, 44225 Dortmund

06. - 08.12.2018

1. Nürnberger Wundkongress

Messe Nürnberg, Messezentrum, 90471 Nürnberg

www.nuernberger-wundkongress.de

12.12.2018

Wound fresh up 2018 Teamwork Wunde

Gesundheitszentrum an der Kreisklinik, Weinbergweg 14, 91154 Roth

Sie wollen immer ganz aktuell wissen, auf welchen Messen und Kongressen wir im Laufe dieses Jahres noch vertreten sind? Auf unserer Homepage unter www.ligasano.com finden Sie tagaktuell alle Termine für dieses Jahr.

Newsletter Dezember 2018

Seminare & Workshops

Praxisnahe Grundseminare und Workshops finden im Dezember in folgenden Orten statt:



03.12.2018	Workshop in	09599 Freiberg
03.12.2018	Grundseminar in	60318 Frankfurt
04.12.2018	Grundseminar in	17252 Mirow
04.12.2018	Workshop in	55234 Hochborn
05.12.2018	Workshop in	06108 Halle
05.12.2018	Workshop in	23617 Stockelsdorf
10.12.2018	Workshop in	89231 Neu-Ulm
12.12.2018	Grundseminar in	18109 Rostock
18.12.2018	Workshop in	31226 Peine
20.12.2018	Grundseminar in	48653 Coesfeld

Wenn Sie als Einzelperson Interesse haben, an einem unserer Seminare teilzunehmen, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir fragen dann bei den jeweiligen Einrichtungen an, ob es möglich ist als Externe/r teilzunehmen.

LIGAMED® medical Produkte GmbH, Pfannenstielstr. 2 in 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 2046 Fax 09103 / 2796 E-Mail: info@ligamed.de

Gerne hält unsere Referentin/ unser Referent auch ein Seminar in Ihrer Einrichtung.
Tagaktuelle Termine für 2018 finden Sie auf unserer Homepage unter www.ligasano.com