

Pelzmärtel

Liebe Newsletter-Abonnenten,

alle Jahre wieder am 11.11. kommt im Frankenland der Pelzmärtel, der oft auch „Bulzämärtl“ ausgesprochen wird. Er verlässt an diesem Tag den Wald, in dem er wohnt und kommt zu den Kindern. Die braven Kinder bekommen von ihm kleine Geschenke, besonders dann, wenn sie ihm ein Gedicht aufsagen oder ihm etwas vorsingen. Und die bösen Kinder ..., welche bösen Kinder? So etwas gibt es in Franken gar nicht, zumindest nicht an diesem Tag.

Und wenn Sie nun denken, das ist nur ein Märchen... Hier auf dem Foto sehen Sie mich mit dem Rosstaler Pelzmärtel, womit der Beweis erbracht ist, dass es den Pelzmärtel wirklich und wahrhaftig gibt.



Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Vorweihnachtszeit,

Ihr Leonhard Hüttner

P.S. Weiterführende Informationen zum fränkischen Pelzmärtel oder Bulzermärtl finden Sie hier:
<https://www.welt.de/newsticker/news3/article110835273/Die-fraenkische-Antwort-auf-den-Nikolaus.html>

Weihnachtsrätsel

Vielleicht bringt Ihnen der Pelzmärtel nachträglich ja auch noch etwas, wenn Sie dieses Silbenrätsel lösen und uns einsenden. **Unter allen richtigen Einsendungen** unserer Newsletter-Abonnenten verlosen wir zusammen mit dem fränkischen Pelzmärtel ein Jahreslos der Aktion Mensch, ein Paket Nürnberger Weihnachts-Spezialitäten und zehn Trostpreise.

bein - bein - bel - brae - ca - cer - che - chen - chen - del - den - den - fe - fin - ger - kno - kno - len - les - mur - pen - rip - rum - sac - schae - spei - steiss - te - ver - vi - wa - wir

Teil der Wirbelsäule, der aus fünf zusammengewachsenen Wirbeln besteht

Die vordersten Knochen der Hand

Längster Knochen des menschlichen Körpers

Unterer Unterarmknochen

Untester Teil der Wirbelsäule

Halswirbel, Mehrzahl

Schützt unser Gehirn

Der Mensch hat 12 davon

Dieser Knochen befindet sich auf der Rückseite des Schienbeins

Wie heißen die Wirbel unterhalb des Brustkorbes?

Die grau hinterlegten Felder ergeben von oben nach unten gelesen das **Lösungswort**.

Bitte schicken Sie es **bis spätestens 15.12.2019 an newsletter@ligamed.de**. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der interessante Fall

Patientendaten und Anamnese:

72-jährige Patientin mit Grunderkrankung Diabetes Typ 2, Polyneuropathie, Lungenkarzinom, Darmkarzinom. Stoma-Anlage seit 04.10.2017. Am 03.11.2017 Zehen-Amputation D1-D3, im Dezember Vorfuß-Amputation. Nach der Vorfuß-Amputation hat der Ehemann die Wunde zunächst selbst versorgt, die Sozialisation wurde am 18.02.2019 mit dazu geholt. Beginn der Wundbehandlung mit LIGASANO® am 06.03.2019 durch die Caritas Sozialstation St. Peter in Bad Königshofen. Wundzustand am 06.03.2019: Nekrotisch und starke Fibrinbeläge, Größe der Wunde nicht erkennbar, Umgebungshaut trocken und schuppig. Klinikum sowie Hausarzt empfehlen die Amputation des Unterschenkels. Auf Bitten der Patientin und des Ehemanns den Unterschenkel zu erhalten, erfolgte auf Anraten der Wundexpertin die Versorgung mit LIGASANO® grün und LIGASANO® weiß.



Abb. 1: 06.03.2019



Abb. 2: 12.03.2019



Abb. 3: 14.03.2019

Die Wundreinigung erfolgte mit Prontosan und LIGASANO® Wundputzer® Intensiv (Größe 5 x 5 x 2 cm). Als Wundfüller wurde das LIGASANO® Wundband grün in der Größe 30 x 1,5 x 0,6 cm verwendet. Als Wundauflage wurde LIGASANO® grün (Größe 15 x 5 x 0,6 cm) über die komplette Wunde gelegt, darüber kamen zwei sterile Wundauflagen LIGASANO® weiß der Größe 24 x 16 x 1 cm, Fixierung mit 10 cm breiter LIGASANO® Binde. Aufgrund der starken Exsudation kam darauf noch ein Superabsorber, der mit LIGAMED® fixiert wurde. Der Verbandwechsel erfolgte alle zwei Tage.



Abb. 4: 18.03.2019



Abb. 5: 18.03.2019 Wundreinigung



Abb. 6: 18.03.2019 Wundreinigung

Die Nekrosen und Fibrinbeläge haben sich gelöst. Die Wundversorgung erfolgt weiterhin mit dem gleichen Verband-Regime und Verbandwechsel-Intervall.



Abb. 7: 18.03.2019 Wundreinigung



Abb. 8: 18.03.2019 Verbandsaufbau mit LIGASANO® grün Wundband mini. Einlegen des Wundbandes nur im Bereich der verbleibenden Nekrosen und Fibrinbeläge.



Abb. 9: 18.03.2019 Wundabdeckung mit sterilem LIGASANO® grün der Größe 15 x 5 x 0,6 cm.

Der interessante Fall



Abb. 10: 18.03.2019 Im Bereich des Granulationsgewebes wurde LIGASANO® weiß Wundband mikro (Größe 50 x 1,5 x 06 cm) eintamponiert und die gesamte Wunde mit zwei sterilen LIGASANO® weiß Wundauflagen der Größe 24 x 16 x 1 cm abgedeckt.



Abb. 11: 18.03.2019 Der Verbandsaufbau wurde mit einer unsterilen LIGASANO® Binde (Größe 300 x 10 x 0,3 cm) fixiert. Die Binde fördert zusätzlich die Durchblutung der umgebenden Haut und nimmt Hautschuppen ab.



Abb. 12: 18.03.2019 Abdeckung mit einer Zetuvit plus Saugkomresse der Größe 10 x 20 cm und abschließende Fixierung mit LIGAMED®. Vorteil: Keine Druckstellen und keine Einschnürung.



Abb. 13: 24.03.2019 Verbandswechsel unverändert, Knochen sichtbar.



Abb. 14: 24.03.2019 Verbandswechsel unverändert, Knochen sichtbar.



Abb. 15: 28.03.2019 Verbandswechsel unverändert.



Abb. 16: 28.03.2019 Verbandswechsel unverändert. Krankenhauseinweisung aufgrund eines Apoplex.



Abb. 17: 01.04.2019 Die Wunde hat sich deutlich verkleinert, die Fibrinbeläge sind deutlich reduziert.



Abb. 18: 01.04.2019 Immer mehr Granulationsgewebe sichtbar.



Abb. 19: 01.04.2019 Wundfüller und Primärverband nun ausschließlich LIGASANO® weiß, um das neu gebildete Granulationsgewebe nicht zu zerstören.



Abb. 20: 05.04.2019 Zunahme der Fibrinbeläge im unteren Teil, daraufhin im Bereich der Beläge wieder LIGASANO® grün Wundband mini eingelegt.



Abb. 21: Wundzustand am 11.04.2019

Der interessante Fall



Abb. 22: 11.04.2019 Verbandsaufbau



Abb. 23: 11.04.2019 Verbandsaufbau



Abb. 24: 11.04.2019 Verbandsaufbau



Abb. 25: 11.04.2019 Verbandsaufbau



Abb. 26: 11.04.2019 Verbandsaufbau



Abb. 27: 11.04.2019 Verbandsaufbau



Abb. 28: 11.04.2019 Verbandsaufbau



Abb. 29: 11.04.2019 Verbandsaufbau



Abb. 30: 11.04.2019 Verbandsaufbau

Leider ist die Patientin noch vor Abschluß der Wundbehandlung verstorben.

Autorin:

Susanne Lesin, Pflegefachkraft, Wundexpertin ICW, Caritas Sozialstation St. Peter, Bad Königshofen

Messen & Kongresse

Im Dezember finden Sie uns in der Industrierausstellung der folgenden Veranstaltungen.

Vielleicht sehen wir uns dort?

Wir freuen uns auf Sie.



04.12.2019

Arbeitsgruppensitzung der ICW Regionalgruppe Bad Oeynhausen

Klinik Bad Oexen, Veranstaltungsraum II, Oexen 27, 32549 Bad Oeynhausen

05. - 07.12.2019

2. Nürnberger Wundkongress

Messe Nürnberg, Messezentrum, 90471 Nürnberg

www.nuernberger-wundkongress.de

11.12.2019

Wundforum des Universitätsklinikums Magdeburg

Uniklinik Magdeburg, Leipziger Str. 44, 39120 Magdeburg

11.12.2019

Wound fresh up 2019 Teamwork Wunde

Gesundheitszentrum an der Kreisklinik Roth, Weinbergweg 14, 91154 Roth

14.12.2019

Wintercollege Wundmanagement

Bayerische Pflegeakademie, Edelsbergstr. 6, 80686 München

Sie wollen immer ganz aktuell wissen, auf welchen Messen und Kongressen wir im Laufe dieses Jahres noch vertreten sind? Auf unserer Homepage unter www.ligasano.com finden Sie tagaktuell alle Termine für dieses Jahr.

Seminare & Workshops



Praxisnahe Grundseminare und Workshops finden im Dezember in folgenden Orten statt:

02.12.2019	Grundseminar	17235 Neustrelitz
02.12.2019	Workshop	25355 Barmstedt
02.12.2019	Workshop	49163 Bohmte
03.12.2019	Workshop	31135 Hildesheim
03.12.2019	Grundseminar	41334 Nettetal
04.12.2019	Produktschulung	57537 Wissen
04.12.2019	Grundseminar	59964 Medebach
05.12.2019	Workshop	16845 Neustadt
05.12.2019	Grundseminar	45711 Datteln
06.12.2019	Grundseminar	44143 Dortmund
09.12.2019	Grundseminar	18513 Splietsdorf
10.12.2019	Grundseminar	41069 Mönchengladbach
10.12.2019	Workshop	49124 Georgsmarienhütte
10.12.2019	Workshop	68794 Oberhausen
10.12.2019	Grundseminar Podologie	85614 Kirchseeon
11.12.2019	Workshop	17489 Greifswald
11.12.2019	Workshop	52146 Würselen
11.12.2019	Workshop	63322 Rödermark
12.12.2019	Workshop	31863 Copenbrügge
12.12.2019	Grundseminar Podologie	90402 Nürnberg
16.12.2019	Grundseminar	08538 Weischlitz
17.12.2019	Grundseminar	17491 Greifswald
18.12.2019	Grundseminar	22399 Hamburg
18.12.2019	Workshop	37671 Höxter

Seminare & Workshops

18.12.2019	Grundseminar	84453 Mühldorf
19.12.2019	Grundseminar	84453 Mühldorf

Wenn Sie als Einzelperson Interesse haben, an einem unserer Seminare teilzunehmen, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir fragen dann bei den jeweiligen Einrichtungen an, ob es möglich ist als Externe/r teilzunehmen.

LIGAMED® medical Produkte GmbH, Pfannenstielstr. 2 in 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 2046 Fax 09103 / 2796 E-Mail: info@ligamed.de

Gerne hält unsere Referentin/unsere Referent auch ein Seminar in Ihrer Einrichtung.
Tagaktuelle Termine für 2019 finden Sie auf unserer Homepage unter www.ligasano.com

Alle Rechte dieses Newsletters liegen bei der LIGAMED medical Produkte GmbH. Jede Verwertung außerhalb des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der LIGAMED® medical Produkte GmbH untersagt und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Microverfilmungen, Abfotografieren und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Schulen, Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Praxen dürfen für die eigene Anwendung bzw. für Schulungszwecke Kopien erstellen, ohne vorher die Genehmigung der LIGAMED® einzuholen.

Wichtiger Hinweis: Alle Angaben, insbesondere zur Applikation, wurden sorgfältig überprüft und entsprechen unserem aktuellen Wissensstand bei Herausgabe dieser Publikation. Dennoch ist jeder Benutzer angehalten, vor einer Anwendung sorgfältig den Beipackzettel der verwendeten Präparate zu prüfen. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.

LIGASANO®, LIGAMED®, Wundputzer®, CAVASAN®, Dr. Guck®, KLIMAGITTER®, KLIMATE GRID®, MOLTOMED® und MOLTOSAN® sind eingetragene Marken der LIGAMED® medical Produkte GmbH, D-90556 Cadolzburg