

Newsletter Februar 2019

News & Infos

Liebe Newsletter-Abonnenten,

nicht nur die Produktsicherheit und der damit verbundene geschulte Umgang liegt uns sehr am Herzen. Wir investieren auch besonders in unsere Mitarbeiter, so dass diese immer sicher bei Ihnen ankommen.



Unser Außendienstteam hat deshalb diesen Winter mit seinen Fahrzeugen ein intensives Fahrsicherheitstraining absolviert.



Wissen Sie schon? Am 11. Februar ist der Welttag der Kranken

Der Welttag der Kranken wurde 1993 von Papst Johannes Paul II. initiiert. An diesem Tag soll allen von Krankheiten heimgesuchten und gezeichneten Menschen gedacht werden. Zu diesem Zweck findet an diesem Tag im Petersdom ein Gedenkgottesdienst statt.

Der Sinn des Gedenktages ist, sich bewusst mit Kranken und Krankheiten auseinander zu setzen, aber auch an die Angehörigen und Pflegenden zu denken. Auch ein Krankenbesuch zusätzlich kann sicher nicht schaden.

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr LIGAMED-Team

Der interessante Fall

Patientendaten und Anamnese:

89 Jahre, weiblich; Hauptdiagnose: Dekubitus Grad 4 nach EPUAP, Nebendiagnosen: Herzinsuffizienz, Mangelernährung. Im Oktober 2017 erfolgte eine stationäre Aufnahme in die Klinik. Zustand nach einem häuslichen Sturz mit Wohnungsöffnung.

Lokaltherapeutische Vorbehandlung in der Klinik:

Aufgrund der kritischen Kolonisation erfolgte die Wundreinigung mit einem Octenidindihydrochlorid + 2,0 g Phenoxyethanol enthaltenem Antiseptikum. Als Wundfüller wurden eine silberhaltige Hydrofaser, sowie eine Absorberkomresse zur Wundabdeckung gewählt. Verbandswechselhäufigkeit wurde aufgrund der starken Exsudation, dem vorhandenen Wundgeruch - welcher vor Verbandsabnahme vorhanden war 2x täglich durchgeführt. Eine Antidekubitusmatratze wurde als druckverteilende Maßnahme eingesetzt mit zusätzlicher Lagerung. Ein Wundabstrich wurde entnommen mit dem Befund: *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* und ein *Acinetobacter baumannii* reichlich. Die Patientin wurde in eine Pflegeeinrichtung entlassen. Erstmalige Vorstellung in unserem Wundzentrum erfolgte am 16.10.2018. Die Wundumgebung hatte oberflächliche Erosionen und teilweise Rötungen mit Verhärtung. Die Wundtiefe umfasste 5 cm bis zum Knochen reichend. Die Wundfläche war mit Fibrin belegt und zeigte nekrotische Areale, welche mit dem Wundgrund stark verhaftet waren. Vereinzelt zeigten sich Granulationsinseln. Es bestand eine Verbindung der Ulzerationen unter dem Hautniveau. Infolge der starken, zähflüssigen und trüben Exsudation war der Verband erschöpft und das Auslaufen des Exsudates verstärkte den Juckreiz, welche die Patientin im Bereich der Wundumgebung verspürte. Bei Verbandabnahme war ein Wundgeruch vorhanden.



Abb. 1: 16.10.2017 Aufnahmebefund: Untertunnelung der drei Ulzerationen unter dem Hautniveau, Wundtiefe: 5 cm, festsitzende Fibrinbeläge und Nekrosen



Abb. 2: 15.11.2017 Restliche, hartnäckig festsitzende Fibrinbeläge am Wundgrund. Wundumgebung teilweise verhärtet und gerötet. Wundgeruch bei Verbandabnahme. Wundreinigung: Wundreinigungslösung auf Basis eines Singuletsauerstoffes mit Meerwasser (Nass-Trockenphase). Umstellung des Wundfüllers auf LIGASANO® weiß steril 15 x 10 x 1 cm. Die Verbindungen wurden trocken mit einem LIGASANO® Mini-Wundband locker austamponiert. Wundabdeckung mit Superabsorber. Fixation mittels Polyestervlies, beschichtet mit Polyacrylatkleber.



Abb. 3: 13.12.2017 Fibrinbeläge haben sich gut gelöst. Rotes körniges Granulationsgewebe vorhanden. Stabile Wundumgebung mit Reduktion der Verhärtungen. Wundtiefe 1 cm. Vollkommener Verschluss der Verbindungen.

Der interessante Fall



Abb. 4: 24.01.2018 Wundkontraktion sichtbar. Deutliche Reduktion der Exsudationsmenge. Stabiles Epithelgewebe im Bereich der Wundumgebung. Verbandswechselhäufigkeit auf 3x wöchentlich reduziert.



Abb. 5: 21.02.2018 Granulationsgewebe rot und körnig. Keine Fibrinbeläge vorhanden. Wundumgebung leicht irritiert, da die Patientin am Wundverband manipuliert.



Abb. 6: Wundzustand am 22.03.2018



Abb. 7: 30.05.2018 stabile, epithelisierte Wunde

Zusammenfassung / Fazit:

LIGASANO® zeigt eine sehr gute Anpassung an die Wundkonturen, ohne dabei Druckbelastung auf die Wunde auszuüben. Die Granulation, ebenso wie die Wundkontraktion, erfolgte sehr rasch bei gleichzeitiger Abnahme der Exsudation. Eine deutliche Keimreduktion konnte durch einen Kontrollabstrich festgestellt werden.

Autorin:

**Heidi Jodl, Gesundheits- und Krankenpflegerin, AZWM®,
Leitung WZ®-WundZentrum Augsburg**

Newsletter Februar 2019

Messen & Kongresse

Im Februar finden Sie uns in der
Industrierausstellung der folgenden
Veranstaltungen.

Vielleicht sehen wir uns dort?

Wir freuen uns auf Sie.



06.02.2019

7. Südbadener Wund- und Pflegekongress

Bürgerhaus am Seepark, Gerhart-Hauptmann-Str. 1, 79110 Freiburg

09.02.2019

Rezertifizierungskurs der BSN-Akademie

Mercure Hotel Maininsel, Maininsel 10-12, 97424 Schweinfurt

20.02.2019

2. Wundtag Diabeteszentrum Dr. Tews

Diabeteszentrum Dr. Tews, Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen

20.02.2019

Fortbildung Wundexperte ICW

Uniklinik Erlangen, Akademie, Krankenhausstr. 12, 91054 Erlangen

20. - 22.02.2019

28. Symposium Intensivmedizin und Intensivpflege

Messe Bremen, Bürgerweide, 28209 Bremen

www.intensivmed.de

23.02.2019

Rezertifizierungstag der Gesundheitsakademie

Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben, Hähnlehofstr. 5,
88520 Weingarten

Sie wollen immer ganz aktuell wissen, auf welchen Messen und Kongressen wir im Laufe dieses Jahres noch vertreten sind? Auf unserer Homepage unter www.ligasano.com finden Sie tagaktuell alle Termine für dieses Jahr.

Newsletter Februar 2019

Seminare & Workshops



Praxisnahe Grundseminare und Workshops finden im Februar in folgenden Orten statt:

01.02.2019	Grundseminar Podologie in	57076 Siegen
05.02.2019	Grundseminar in	19061 Schwerin
05.02.2019	Workshop in	35578 Wetzlar
05.02.2019	Workshop in	56154 Boppard
06.02.2019	Grundseminar in	12107 Berlin
06.02.2019	Grundseminar in	83253 Rimsting
06.02.2019	Workshop in	96049 Bamberg
07.02.2019	Workshop in	14467 Potsdam
07.02.2019	Grundseminar in	22926 Ahrensburg
07.02.2019	Grundseminar in	23909 Ratzeburg
07.02.2019	Workshop in	93155 Hemau
12.02.2019	Workshop in	15890 Eisenhüttenstadt
12.02.2019	Grundseminar in	17389 Anklam
12.02.2019	Workshop in	34497 Korbach

Newsletter Januar 2019

Seminare & Workshops

12.02.2019	Workshop in	49176 Hilter
13.02.2019	Grundseminar in	03130 Spremberg
13.02.2019	Workshop in	49661 Cloppenburg
13.02.2019	Grundseminar in	82178 Puchheim
13.02.2019	Workshop in	91177 Thalmässing
14.02.2019	Grundseminar Podologie in	20097 Hamburg
14.02.2019	Grundseminar Podologie in	34119 Kassel
19.02.2019	Grundseminar in	13585 Berlin
19.02.2019	Grundseminar in	19288 Ludwigslust
19.02.2019	Workshop in	95326 Kulmbach
20.02.2019	Grundseminar in	57334 Bad Laasphe
20.02.2019	Grundseminar in	59505 Bad Sassendorf
20.02.2019	Grundseminar in	99423 Weimar
21.02.2019	Grundseminar in	17153 Jürgenstorf
26.02.2019	Grundseminar in	07586 Kraftsdorf
26.02.2019	Grundseminar in	19061 Schwerin
26.02.2019	Grundseminar in	27472 Cuxhaven
26.02.2019	Grundseminar in	35396 Giessen
26.02.2019	Grundseminar in	94315 Straubing
27.02.2019	Grundseminar in	12099 Berlin
27.02.2019	Grundseminar in	17389 Anklam

Newsletter Januar 2019

Seminare & Workshops

27.02.2019	Grundseminar in	27711 Osterholz
27.02.2019	Workshop in	35305 Grünberg
27.02.2019	Grundseminar in	84419 Schwindegg
27.02.2019	Grundseminar in	87700 Memmingen
28.02.2019	Grundseminar in	21502 Geesthacht

Wenn Sie als Einzelperson Interesse haben, an einem unserer Seminare teilzunehmen, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir fragen dann bei den jeweiligen Einrichtungen an, ob es möglich ist als Externe/r teilzunehmen.

LIGAMED® medical Produkte GmbH, Pfannenstielstr. 2 in 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 2046 Fax 09103 / 2796 E-Mail: info@ligamed.de

Gerne hält unsere Referentin/ unser Referent auch ein Seminar in Ihrer Einrichtung.
Tagaktuelle Termine für 2018 finden Sie auf unserer Homepage unter www.ligasano.com