

Schlitzkompressen in zusätzlichen Größen

Seit Januar diesen Jahres haben wir zusätzliche Größen unserer LIGASANO® Schlitzkompressen im Sortiment, sowohl in steriler als auch in unsteriler Ausführung.

LIGASANO® Schlitzkompressen

Art.-Nr.	PZN	Versandereinheit (VE)						
15164-020	16238241	20 Stück	5 x	5 x	1 cm	steril	○	Neu ab 01.01.2020
15165-020	09194460	20 Stück	7,5 x	7,5 x	1 cm	steril	○	Neu ab 01.01.2020
15166-020	16238258	20 Stück	10 x	10 x	1 cm	steril	○	Neu ab 01.01.2020
15063-020	01557696	20 Stück	5 x	5 x	1 cm	unsteril	○	Neu ab 01.01.2020
15064-020	16238264	20 Stück	7,5 x	7,5 x	1 cm	unsteril	○	Neu ab 01.01.2020
15065-020	16238270	20 Stück	10 x	10 x	1 cm	unsteril	○	Neu ab 01.01.2020



Mit den LIGASANO® Schlitzkompressen ist eine sehr einfache, günstige und allergenfreie Versorgung bei allen gängigen Zu- und Ableitungen gewährleistet.



Sie möchten ein Muster unserer neuen Größen? Antworten Sie einfach nur auf diese E-Mail mit dem Vermerk "Muster Schlitzkompressen" und wir senden Ihnen Muster aller verfügbaren Größen zu. Vergessen Sie nicht, uns Ihre Postanschrift mitzuteilen.

Welttag der Kranken

Am **11. Februar** jährt sich übrigens der **Welttag der Kranken** bereits zum 28. Mal. Dieser Gedenktag wurde 1993 von Papst Johannes Paul II. eingeführt um allen von Krankheiten heimgesuchten und gezeichneten Menschen zu gedenken.

Im Rahmen dieses Gedenktages findet im Petersdom jedes Jahr ein Gottesdienst zum Welttag der Kranken statt und der Papst richtet zudem eine Botschaft an die Öffentlichkeit. Dieser Gedenktag soll Gelegenheit bieten, sich mit Kranken und Krankheiten auseinanderzusetzen, Kranke sollen an diesem Tag besucht oder angerufen werden. Wer Kranke pflegt, egal ob privat oder beruflich, soll gewürdigt werden.

Der Tag bietet auch die Chance, nicht nur die alltäglichen Krankheiten als solche anzuerkennen, sondern sich auch mit selteneren Krankheiten auseinanderzusetzen und sich generell über Krankheiten zu informieren.

Der interessante Fall

Patientendaten und Anamnese:

67-jähriger Patient, Z. n. thrombosiertem Aneurysma der Aorta ascendens, hochgradige Einengung des 5. Foramen intervertebrale beidseits, Tetraparese, partielle Stimmbandparese, arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus. Der Patient wurde von einem externen Wundexperten versorgt. Die Wunde besteht seit 15. Oktober 2018 als Folge einer Druckstelle am Rücken in Höhe des untersten Brustwirbels, seitlich der Wirbelsäule. Die Wundbehandlung erfolgte mit einem Hydrokolloidverband, das Verbandwechselintervall betrug drei Tage. Befund stagniert seit Oktober. Wundgröße 1,8 x 2,2 x ca. 0,6 cm (l x b x t). Umstellung auf LIGASANO® am 18. Dezember 2018.



Abb. 1: 02.01.2019 Wunde nekrotisch belegt, die quadratische livide Verfärbung beruht auf einer Tiefenschädigung des Gewebes, deshalb größere Polsterung.



Abb. 2: 02.01.2019 Wundreinigung mit Prontosan-getränktem Wundputzer®, Nassphase ca. 20 Min; Wundfüller LIGASANO® Stick; Wundaufgabe LIGASANO® 10 x 10 x 2 cm; täglicher Verbandwechsel.



Abb. 3: 16.02.2019 Nekrosen und Fibrinbelag (ca. 40%) entfernt; darunter tiefe Wundhöhle mit Taschenbildung sichtbar, gelblicher Belag, Wundränder mazeriert und atrophiert; Wunde übel riechend; Verbandwechsel-Regime unverändert.



Abb. 4: 18.02.2019 Nekrosen und Fibrinbelag (ca. 40%) entfernt; darunter tiefe Wundhöhle mit Taschenbildung sichtbar, gelblicher Belag, Wundränder mazeriert und atrophiert; Wunde übel riechend; Verbandwechsel-Regime unverändert.



Abb. 5: 20.02.2019 Der Patient wird jetzt seitlich positioniert; Therapie/Wundversorgung unverändert.



Abb. 6: 25.02.2019 Wundreinigung mit Lavanox Wundspüllösung



Abb. 7: 25.02.2019 Tamponade aus LIGASANO® orange für ca. 8 Stunden (Fibrinbeläge lösen sich danach gut)



Abb. 8: 25.02.2019 Wundverband LIGASANO® weiß steril, weiterhin täglicher Verbandwechsel



Abb. 9: 02.03.2019 Verband-Regime unverändert

Der interessante Fall



Abb. 10: Verband-Regime unverändert



Abb. 11: Verband-Regime unverändert



Abb. 12: 23.04.2019 Die Wunde hat sich deutlich verkleinert; Wundreinigung mit Lavanox Wundspüllösung.



Abb. 13: 23.04.2019 Wundfüller LIGASANO® Stick, Wundauflage LIGASANO® weiß steril 10 x 10 x 2 cm



Abb. 14: 02.05.2019 Wundgröße 1 x 1 x 0,2 cm (l x b x t), die Wunde ist sauber und granuliert



Abb. 15: 02.05.2019 Wundreinigung Lavanox Wundspüllösung, Wundfüller LIGASANO® Stick, Wundauflage LIGASANO® weiß steril 10 x 10 x 2 cm

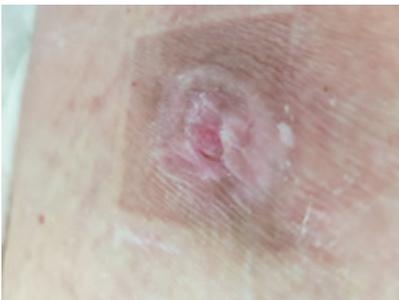


Abb. 16: 24.05.2019 Die Wunde ist fast vollständig abgeheilt, Wunde und umgebende Haut reiz- und geruchlos, keine tieferen Gewebeschädigungen mehr.



Abb. 17: Aufnahme vom August 2019

Die Therapie wurde noch bis Juni 2019 weitergeführt, dann war die Wunde komplett geschlossen. Präventive Maßnahmen (Positionierung und druckentlastende Weichlagerung) werden weiterhin durchgeführt.

Autorin:

Ilona Woitschütze, Altenpflegerin, Fachtherapeutin Wunde und Diabetes, Fachkraft für Schmerz-/Palliativpflege

Newsletter Februar 2020

Messen & Kongresse

Im Februar und März finden Sie uns in der Industrieausstellung der folgenden Veranstaltungen.

Vielleicht sehen wir uns dort?

Wir freuen uns auf Sie.



06. - 08.02.2020 16. Stuttgarter Intensivkongress Schwabenlandhalle, Guntram-Palm-Platz 1, 70734 Fellbach
08.02.2020 1. Wundsymposium des Wundnetzes Hannover West Wandelhalle, Poststr. 2, 31542 Bad Nenndorf
09.02.2020 Wound fresh up 2020 - Teamwork Wunde Gesundheitszentrum an der Kreisklinik Roth, Weinbergweg 14, 91154 Roth
20.02.2020 Pflegetagung Uniklinik Ulm Uniklinik Ulm, Hörsaal Zentrum für Innere Medizin, Albert-Einstein-Allee 29, 89081 Ulm
26. - 28.02.2020 30. Symposium Intensivmedizin und Intensivpflege Messe Bremen, Bürgerweide, 28209 Bremen www.intensivmed.de
28. - 29.02.2020 14. Dortmunder Wundforum Kongresszentrum Westfalenhallen, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund
29.02.2020 12. Freiburger Wundsymposium Kurhaus Bad Krozingen, Kurhausstr. 1, 79189 Bad Krozingen www.freiburger-wundsymposium.de
29.02.2020 10. Bayreuther Wundforum Evangelisches Gemeindehaus, Richard-Wagner-Str. 24, 95444 Bayreuth
04.03.2020 Wound fresh up 2020 - Teamwork Wunde Gesundheitszentrum an der Kreisklinik Roth, Weinbergweg 14, 91154 Roth
04.03.2020 12. Kieler Wundsymposium Bürgerhaus, Kopperpahler Allee 67, 24119 Kronshagen
05.03.2020 Internationale Konferenz für Podologen NH Hotel Düsseldorf City, Kölner Str. 186-188, 40227 Düsseldorf
11.03.2020 12. Sauerländer Fachkongress Kaiserhaus Arnsberg, Möhnestr. 55, 59755 Arnsberg

Messen & Kongresse

11. - 13.03.2020 11. ICW-Süd / HWX-Kongress Tagungszentrum Festung Marienberg, Am Congress Centrum, 97082 Würzburg
12. - 14.03.2020 Deutscher Pflegetag 2020 STATION Berlin (Gleisdreieck), Luckenwalder Str. 4-6, 10963 Berlin www.deutscher-pflegetag.de
13.03.2020 OPED Wund-Pflege-Experte 2020 OPED GmbH, Medizinpark 1, 83626 Valley
17.03.2020 Moselländisches Wundsymposium Weinbrunnenhalle, Moselweinstr. 35, 54536 Kröv
18.03.2020 Fachtagung Wunde der bbw GmbH Marktredwitz Porzellanikon, Werner-Schürer-Platz, 1, 95100 Selb
20. - 21.03.2020 10. Mitteldeutscher Wundkongress Maritim Hotel, Saal 2, Otto-von-Guericke-Str. 87, 39104 Magdeburg www.tnbildung.de/10-mitteldeutscher-wundkongress
21. - 24.03.2020 9. Internationale Sylter Palliativtage Congress Center Sylt, Friedrichstr. 44, 25980 Westerland www.palliativtage-sylt.de
25.03.2020 5. Wundforum Nordhessen Cineplex Kino, Friedrich-Ebert-Allee 8a, 34225 Baunatal
25.03.2020 5. Pflegekongress für Intensivmedizin Bavariasaal, Wirtshaus am Bavariapark, Theresienhöhe 15, 80339 München
27.03.2020 8. Symposium der Klinik für Plastische- und Handchirurgie mit Brandverletzentrum BG Klinikum Bergmannstrost, Merseburger Str. 165, 06112 Halle
27. - 28.03.2020 7. Berlin-Brandenburger Wundtag Charité Campus Virchow-Klinikum (Forum 3), Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
27.03.2020 2. Frankfurter Akut-Pflegesymposium Uniklinik Frankfurt, Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt
27. - 28.03.2020 11. Tag der Wunde Schön Klinik Vogtareuth, Krankenhausstr. 20, 83569 Vogtareuth

Sie wollen immer ganz aktuell wissen, auf welchen Messen und Kongressen wir im Laufe dieses Jahres noch vertreten sind? Auf unserer Homepage unter www.ligasano.com finden Sie tagaktuell alle Termine für dieses Jahr.

Newsletter Februar 2020

Seminare & Workshops



Praxisnahe Grundseminare und Workshops finden im Februar und März in folgenden Orten statt:

03.02.2020	Grundseminar	97072 Würzburg
03.02.2020	Grundseminar	15236 Frankfurt/Oder
04.02.2020	Workshop	63071 Offenbach
04.02.2020	Produktschulung	65929 Frankfurt/Main
05.02.2020	Grundseminar	04425 Taucha
05.02.2020	Workshop	06618 Naumburg
05.02.2020	Grundseminar	17168 Groß Wüstenfelde
05.02.2020	Workshop	31141 Hildesheim
05.02.2020	Grundseminar	76689 Karlsdorf
05.02.2020	Produktschulung	91242 Ottensoos
06.02.2020	Workshop	63165 Mühlheim
06.02.2020	Grundseminar	19205 Veelböken
06.02.2020	Produktschulung	30659 Hannover
10.02.2020	Grundseminar	66482 Zweibrücken
10.02.2020	Workshop	36088 Hünfeld
11.02.2020	Workshop	18258 Schwaan
11.02.2020	Workshop	35644 Hohenahr
12.02.2020	Workshop	30171 Hannover
12.02.2020	Grundseminar	22399 Hamburg
13.02.2020	Grundseminar	67550 Worms
17.02.2020	Workshop	36396 Steinau
18.02.2020	Produktschulung	48165 Münster
20.02.2020	Grundseminar	17213 Malchow
20.02.2020	Produktschulung	90562 Heroldsberg

Seminare & Workshops

21.02.2020	Workshop	06108 Halle
24.02.2020	Workshop	34346 Hann. Münden
25.02.2020	Produktschulung	65929 Frankfurt/Main
25.02.2020	Grundseminar	69115 Heidelberg
26.02.2020	Workshop	34376 Immenhausen
26.02.2020	Grundseminar	69483 Wal-Michelbach
26.02.2020	Grundseminar	04643 Geithain
26.02.2020	Grundseminar	81379 München
27.02.2020	Workshop	34117 Kassel
02.03.2020	Grundseminar	49453 Rehden
03.03.2020	Workshop	17192 Waren
03.03.2020	Workshop	70195 Stuttgart
09.03.2020	Workshop	35396 Giessen
10.03.2020	Grundseminar Podologie	31812 Bad Pyrmont
10.03.2020	Workshop	57072 Siegen
11.03.2020	Grundseminar	22399 Hamburg
11.03.2020	Workshop	19243 Wittenburg
16.03.2020	Workshop	17207 Röbel
17.03.2020	Workshop	70195 Stuttgart
17.03.2020	Grundseminar	19061 Schwerin
18.03.2020	Grundseminar	37235 Hessisch Lichtenau
18.03.2020	Workshop	19063 Schwerin
18.03.2020	Grundseminar	48151 Münster
19.03.2020	Grundseminar	63571 Gelnhausen
19.03.2020	Produktschulung	91056 Erlangen
21.03.2020	Grundseminar Podologie	58239 Schwerte
23.03.2020	Workshop	63071 Offenbach
26.03.2020	Workshop	34117 Kassel
31.03.2020	Workshop	57627 Hachenburg
31.03.2020	Workshop	34497 Korbach

Seminare & Workshops

Sie möchten als Einzelperson an einem Seminar teilnehmen? Wählen Sie aus der umseitigen Veranstaltungsliste oder unter <https://www.ligasano.com/de/veranstaltungen/seminartermine> einen Ort und Termin aus und fragen Sie bei uns an.

Wir prüfen dann für Sie ob eine Teilnahme möglich ist. Tel: 09103-2046 oder info@ligamed.de

Sie interessieren sich für eine Fortbildung in Ihrem Haus? Informationen dazu finden Sie unter <https://www.ligasano.com/de/veranstaltungen/das-seminar> oder Sie rufen uns an unter 09103-2046 oder schreiben uns an info@ligamed.de

LIGAMED® medical Produkte GmbH, Pfannenstielstr. 2 in 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 2046 Fax 09103 / 2796 E-Mail: info@ligamed.de
www.ligasano.com

Alle Rechte dieses Newsletters liegen bei der LIGAMED medical Produkte GmbH. Jede Verwertung außerhalb des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der LIGAMED® medical Produkte GmbH untersagt und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Microverfilmungen, Abfotografieren und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Schulen, Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Praxen dürfen für die eigene Anwendung bzw. für Schulungszwecke Kopien erstellen, ohne vorher die Genehmigung der LIGAMED® einzuholen.

Wichtiger Hinweis: Alle Angaben, insbesondere zur Applikation, wurden sorgfältig überprüft und entsprechen unserem aktuellen Wissensstand bei Herausgabe dieser Publikation. Dennoch ist jeder Benutzer angehalten, vor einer Anwendung sorgfältig den Beipackzettel der verwendeten Präparate zu prüfen zu beachten. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.

LIGASANO®, LIGAMED®, Wundputzer®, CAVASAN®, Dr. Guck®, KLIMAGITTER®, KLIMATE GRID®, MOLTOMED® und MOLTOSAN® sind eingetragene Marken der LIGAMED® medical Produkte GmbH, D-90556 Cadolzburg